

# ASC-US ASC-H LSIL HSIL

NOVINKA

Pro rychlé a účinné odstranění změn  
na děložním čípku

v období čekání na kontrolní stěr použijte

# DeflaGyn®

VAGINÁLNÍ GEL NA PODPORU REMISE PO NEJASNÝCH  
CERVIKÁLNÍCH STĚRECH (ASC-US, ASC-H, LSIL NEBO HSIL)



Zdravotnický prostředek

Na celou dobu léčby (3 × 28 dní) je potřeba zakoupit 3 balení:  
1) u ošetřujícího lékaře 2) ve vaší lékárně 3) [eshop.axonia.cz](http://eshop.axonia.cz)

# Jak používat DeflaGyn®

Vaginální gel DeflaGyn® by se měl používat  
pouze po poradě s lékařem.

## Nemenstrující pacientky

DeflaGyn® by se měl používat po dobu 3x28 dnů. Po 28 dnech léčby přerušete používání vaginálního gelu DeflaGyn® na dobu 3 dnů. Pak pokračujte v léčbě po dobu dalších 28 dnů a přestaňte na další 3 dny. Poté pokračujte ve třetím léčebném cyklu.

## Menstrující pacientky


Nepoužívejte vaginální gel DeflaGyn® během menstruace (cca 3–5 dní za cyklus). Není nutné přerušovat léčbu na další 3 dny, protože menstruace se již počítá jako přestávka v léčbě. Při používání lokálních intravaginálních (léčebných a/nebo čistících a/nebo antikoncepčních) přípravků dodržte časový odstup nejméně 2 hodin před a/nebo po použití vaginálního gelu DeflaGyn®. Před použitím láhev dobře protřepejte!




1 Umístěte láhev DeflaGynu® na rovný povrch. Odšroubujte uzávěr láhve. Nasadte špičku aplikátoru na ústí láhve.



2 Otočte láhev DeflaGynu® s vloženým aplikátorem dnem vzhůru (o 180°). Natáhněte 5 ml gelu pomalým tahem pístu aplikátoru, dokud nedosáhne značky 5 ml. Otočte láhev a položte jí zpátky na rovný povrch. Vytáhněte z ní naplněný aplikátor.

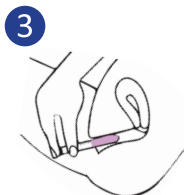

3 Lehněte si na záda s polštářem pod pánev. Vložte aplikátor hluboko do pochvy (dokud nedosáhne děložního čípku). Nejjednodušší je to udělat s pokrčenými koleny. Jakmile jste umístila aplikátor do správné polohy, pomalu tiskněte píst, abyste vytlačila gel a pak aplikátor vytáhněte z pochvy.

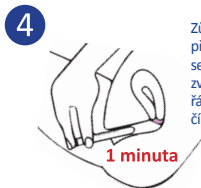

4 Zůstaňte vleže po dobu přibližně 1 minuty. Ujistěte se, že vaše pánev je pořád zvednutá. Tím se zajistí řádné pokrytí děložního čípku vaginálním gelem.

**Výrobce:** DEFLAMED GmbH, Josef-Müller-Weg 6,  
CH-6210 Sursee, Švýcarsko

**Výhradní distributor pro ČR a SR:** AXONIA, a.s., Bydžovská 185,  
190 14 Praha 9, tel. 224 240 832, info@axonia.cz, www.axonia.cz.

DEFLAMED  
GMBH

**axonia**  
PHARMA