

RegreSIL® Vaginální krémový gel

Zdravotnický prostředek k ošetření mikrolézí způsobených virem HPV nebo suchostí.

Návod k použití:

Účel použití:

Ochranný krémový gel, který díky svým vlastnostem vytváří obrannou bariéru a podporuje léčbu intraepiteliálních lézí způsobených HPV (lidský papilomavirus), napomáhá procesu hojení lézí.

Indikace:

Zdravotnický prostředek pomáhá:

- Při kontrole oblastí cervikálně-vaginální transformace.
 - Při léčbě zánětlivých onemocnění, dystrofie a intraepiteliálních mikrolézí (SIL): Podporuje epitelizační proces. Napomáhá odstraňování „odumřelých buněk“ a udržováním čistoty případných mikroporanění napomáhá zlepšení epitelizace.
 - Při obnově normálního fyziologického stavu po provedení diatermokoagulací nebo kolposkopii.
 - Při léčbě suchosti poševní sliznice nebo vulvy.
 - Při obnově normálního fyziologického stavu při dolíčování po odstranění genitálních bradavic.
- V případě lézí doprovázených pálením a/nebo svěděním: vytváří ochrannou vrstvičku, která ve velmi krátké době zmírňuje bolest, protože vytváří podmínky pro rychlejší hojení.

Složení:

kurkumin, dokosanol, embilika lékařská, aloe vera gel, polydokanol, glyceryl laurát, mastné kyseliny C_{12,20} (8) OE, imidazolidinylová močovina, dehydrooctan sodný, CM betaglukán, EDTA dvojsodná sůl, kyselina mléčná, voda, vazelinový olej, parahydroxybenzoát: methylový, ethylový, propylový, butylový.

Dávkování a způsob podávání

- 1 vaginální aplikace (pomocí aplikátoru) po dobu 6 dní nebo dle pokynů lékaře.
- **Při dolíčení po odstranění genitálních bradavic:** 2 aplikace (bez aplikátoru) denně po dobu 6 dní nebo dle pokynů lékaře.
- **V případě intraepiteliálních lézí (SIL) vyvolaných virem HPV:**
První týden: 1 vaginální aplikace (pomocí aplikátoru) po dobu 6 dní.
Následující týdny: 1 vaginální aplikace (pomocí aplikátoru) 2krát týdně po dobu 3–6 měsíců nebo dle pokynů lékaře.
- **Při pálení nebo svědění:** 1 vaginální aplikace (pomocí aplikátoru) nebo vulvární (bez aplikátoru) denně nebo dle pokynů lékaře.

Postup aplikace pomocí aplikátoru:

1. Pomocí perforátoru na uzávěru proveďte otvor na ústí tuby.
2. Našroubujte na tubu vaginální aplikátor.
3. Stlačte tubu tak, aby se aplikátor naplnil.
4. Odsroubujte aplikátor z tuby, zasuňte jej do vaginy a zatlačte píšť až na doraz.
5. Vytáhněte aplikátor i píšť; aplikátory jsou určeny na jedno použití (po použití je zahodte).

Upozornění:

Aplikátor je určený na jedno použití. Po použití aplikátor zahodte. *Ženy v plodném věku a ženy, které si přejí otěhotnět, se musí před použitím tohoto prostředku poradit se svým gynekologem.* Přírodní látky, které jsou obsaženy v tomto prostředku, způsobují jeho zbarvení; během a po aplikaci dávejte pozor, abyste si neušpinili oděv skvrnami. Nepoužívejte tento výrobek, pokud trpíte alergií z jeho složek; Nepoužívejte tento výrobek po uplynutí data spotřeby; Nepoužívejte tento výrobek, pokud má poškozený obal; *V případě přetrvávajícího pálení nebo svědění se poraďte se svým lékařem.* Datum spotřeby se vztahuje na neotevřený a správně uskladněný výrobek; Nekonzumovat! Odkládejte mimo dosah dětí. Před a po použití si umyjte ruce. Nepoužívejte při prokázané precitlivlosti na některou složku tohoto výrobku. K lokálnímu použití. Uchovávejte na chladném a suchém místě, chráněném před světlem.

Revize: prosinec 2018

Výrobce: Labomar Spa Via N. Sauro 35 I, Istrana (TV), Itálie

Distributor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika, Tel. +420 224 240 832, info@axonia.cz, www.axonia.cz

30 ml e  0373
axonia
PHARMA

RegreSIL® Vaginálny krémový gél

Zdravotnícka pomôcka na ošetrovanie mikrolézií vyvolaných HPV vírusom alebo suchosťou.

Návod na použitie:

Účel použitia:

Ochranný krémový gél, ktorý vďaka svojim vlastnostiam vytvára obrannú bariéru a podporuje liečbu intraepiteliálnych lézií spôsobených vírusom HPV (ľudský papilomavírus), pričom napomáha procesu hojenia lézií.

Indikácie:

Zdravotnícka pomôcka pomáha:

- Pri kontrole oblastí cervikálno-vaginálnej transformácie.
 - Pri liečbe ochorenia zápalového a dystrofického charakteru a intraepiteliálnych mikrolézií (SIL): Podporuje proces epitelizácie. Pomáha odstrániť „odumreté bunky“ a udržiavaním prípadných mikroporanení v čistej napomáha ich lepšej epitelizácii.
 - Pri obnovení normálneho fyziologického stavu po vykonaní diatermokoagulácie alebo kolposkopie.
 - Pri liečbe suchosti pošvovej sliznice alebo ohanbia.
 - Pri obnovení normálneho fyziologického stavu pri doliečovaní po odstránení genitálnych bradavíc.
- V prípade lézií, ktoré vyvolávajú pálenie a/alebo svrbenie: vytvára ochranný film, ktorý v krátkom čase zmierni bolesť a vytvorí podmienky pre rýchlejšie hojenie.

Zloženie:

kurkumin, dokosanol, embilika lekárska, aloe vera gél, polydokanol, glyceryl laurát, mastné kyseliny C_{12,20} (8) OE, imidazolidinylová močovina, dehydrooctan sodný, CM betaglukán, EDTA dvojsodná soľ, kyselina mliečna, voda, vazelinový olej, parahydroxybenzoát: metylový, etylový, propylový, butylový.

Dávkovanie a spôsob podávania

- 1 vaginálna aplikácia (pomocou aplikátora) po dobu 6 dní alebo podľa pokynov lekára.
- **Pri doliečovaní po odstránení genitálnych bradavíc:** 2 aplikácie (bez aplikátora) denne po dobu 6 dní alebo podľa pokynov lekára.
- **Pri intraepiteliálnych léziách (SIL) vyvolaných vírusom HPV:**
prvý týždeň: 1 vaginálna aplikácia (pomocou aplikátora) po dobu 6 dní
ďalšie týždne: 1 vaginálna aplikácia (pomocou aplikátora) 2x za týždeň po dobu 3-6 mesiacov alebo podľa pokynov lekára.
- **V prípade pálenia alebo svrbenia:** 1 vaginálna aplikácia (pomocou aplikátora) alebo vulvárna (bez aplikátora) denne alebo podľa pokynov lekára.

Postup aplikácie pomocou aplikátora:

1. Pomocou perforátoru na uzávěru urobte otvor na ústí tuby.
2. Nasrutkujte vaginálny aplikátor.
3. Stlačte tubu tak, aby sa celý aplikátor naplnil.
4. Odsrutkujte aplikátor z tuby, vložte ho do vaginy a zatlačte píšť až na doraz.
5. Vytáhnite aplikátor aj píšť; aplikátory sú určené na jednorazové použitie (po použití aplikátor vyhodte).

Varovania:

Aplikátor je určený na jednorazové použitie. Po použití celý aplikátor vyhodte. *Ženy v plodnom veku a ženy, ktoré si želajú otěhotniť, sa musia pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky poradiť so svojím gynekológom.* Prírodné látky, ktoré táto zdravotnícka pomôcka obsahuje, spôsobujú sfarbenie výrobku. Pri a po aplikácii dávajte veľký pozor, aby ste si nezašpinili oděv fľakmi. Nepoužívať tento výrobek, ak trpíte alergiou na ktorúkoľvek jeho zložku; Nepoužívať tento výrobek po uplynutí dátumu spotřeby; Nepoužívať tento výrobek, ak je poškodené balenie; *V prípade pretrvávajúceho pálenia alebo svrbenia sa poraďte so svojím lekárom.* Dátum spotřeby sa vztahuje na neotvorený a správně uchovávaný výrobek; Nekonzumovat! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před a po použití si umyjte ruce. Nepoužívejte při prokázané precitlivlosti na některou složku tohoto výrobku. Na lokální aplikáciu. Uchovávať v chladnom a suchom, chráně pred svetlom.

Revízia: December 2018

Výrobca: Labomar Spa Via N. Sauro 35 I, Istrana (TV), Taliansko

Distribútor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika, Tel. +420 224 240 832, info@axonia.cz, www.axonia.cz

30 ml e  0373
axonia
PHARMA