

Přečtěte si pečlivě celý příbalový leták: obsahuje důležité informace pro spotřebitele. Jedná se o zdravotnický prostředek, který je dostupný bez lékařského předpisu. Nicméně abyste dosáhli lepší účinnosti, měli byste jej užívat v souladu s popsanou indikací.

- Ponechte si tento příbalový leták, možná jej budete muset přečíst znovu.
- Pro další informace nebo rady kontaktujte svého lékaře a/nebo lékárníka.
- Pokud příznaky přetrvávají po určité době, poraďte se s lékařem.

Přečítajte si starostlivo celý príbalový leták: obsahuje dôležité informácie pre spotrebiteľa. Ide o zdravotnícku pomôcku, ktorá je dostupná bez lekárskeho predpisu. Avšak aby ste dosiahli lepšiu účinnosť, mali by ste ju používať v súlade s popísanou indikáciou.

- Ponechajte si tento príbalový leták, možno si ho budete musieť prečítať znova.
- Pre ďalšie informácie alebo rady sa obráťte na svojho lekára a/alebo lekárničku.
- Ak príznaky pretrvávajú po určitej dobe, poraďte sa s lekárom.

# Ginexid<sup>®</sup>

clx  
vaginální čípky

## SLOŽENÍ

Polosyntetické glyceridy, olejový výtažek z vilínu, olejový výtažek z hermánku, vitamin E acetat, chlorhexidin-diglukonát.

## ZPŮSOB BALENÍ

GINEXID je dodáván ve formě čípků pro vaginální použití. Balení obsahuje 10 vaginálních čípků po 2 g. Každý čípek obsahuje 10 mg chlorhexidin-diglukonátu.

## POPIS A DŮVODY PRO POUŽITÍ

Ženský reprodukční systém je orgán vystavený vnitřním a vnějším kontaktům, a proto je také vystaven případným bakteriálním útokům. Přirozené obranné mechanismy jsou tvořeny bakteriální mikroflórou přítomnou v pochvě, kterou z více než 90% tvoří kmene Lactobacillus. Rovnováha, na níž je poševní bakteriální flóra založena, se může měnit (fyzickým a emocionálním vypětím, pohlavní aktivitou, antikoncepcí, léčivými přípravky, atd.) a vulvovaginální oblast může být osídlena patogenními bakteriemi, které způsobují podráždění a infekce.

## INDIKACE

Vaginální čípky GINEXID se indikují k ženské intimní hygieně pro svůj zklidňující, ochranný a rovnováhu opět nastolující účinek. Kombinace látek přírodního původu pomáhá předcházet a/nebo omezovat poševní zánětlivé stavy.

## DŮVODY PRO NEPOUŽÍVÁNÍ ČÍPKŮ

Důvodem pro nepoužívání čípků je individuální precitlivlost na některou ze složek produktu.

### *Těhotenství a kojení*

Za těchto okolností je vhodné poradit se s lékařem.

*Vliv na schopnost řídit a obsluhovat zařízení nebo stroje*

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

# Ginexid<sup>®</sup>

clx  
vaginálne čapíky

## ZLOŽENIE

Polosyntetické glyceridy, olejový výtažek z vilínu, olejový výtažek z harmančeka, vitamin E acetat, chlórhexidin diglukonát.

## SPÔSOB BALENIA

GINEXID sa dodáva vo forme čapíkov na vaginálne použitie. Balenie obsahuje 10 vaginálnych čapíkov po 2 g. Každý čapík obsahuje 10 mg chlórhexidin diglukonátu.

## POPIS A DÔVODY NA POUŽITIE

Ženský reprodukčný systém je orgán vystavený vnútorným a vonkajším kontaktom, a preto je vystavený aj prípadným bakteriálnym útokom. Prírodné obranné mechanizmy sú tvorené bakteriálnou mikroflórou prítomnou v pošve, ktorú z vyše 90% tvoria kmene Lactobacillus. Rovnováha, na ktorej je bakteriálna flóra pošvy založená, sa môže meniť (fyzickým a emocionálnym vypätím, pohlavnou aktivitou, antikoncepciou, liekmi atď.) a vulvovaginálna oblasť môže byť osídlená patogénnymi baktériami, ktoré spôsobujú podráždenie a infekcie.

## INDIKÁCIE

Vaginálne čapíky GINEXID sa indikujú na ženskú intimnú hygienu pre svoj upokojujúci a ochranný účinok s opätovným nastolením rovnováhy. Kombinácia látok prírodného pôvodu pomáha predchádzať pošvovým zápalom, resp. ich obmedzuje.

## DÔVODY NA NEPOUŽÍVANIE ČAPÍKOV

Dôvodom na nepoužívanie čapíkov je individuálna precitlivosť na niektorú zo zložiek produktu.

### *Tehotenstvo a dojčenie*

Za týchto okolností je vhodné poradiť sa s lekárom.

*Vplyv na schopnosť riadiť a obsluhovať zariadenia alebo stroje*

Žiadne špeciálne opatrenia nie sú potrebné.

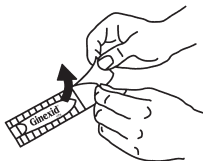
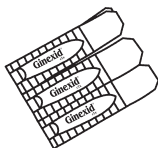
**INTERAKCE S JINÝMI PRODUKTY**

Interakce s jinými produkty nejsou známy, proto je před použitím vaginálních čípků GINEXID současně s jinými zdravotnickými prostředky nebo léky pro vaginální použití vhodné kontaktovat lékaře.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Vyjměte čípek tahem za dvě křídélka blistru a zaveďte ho hluboko do pochvy.

Před a po použití zdravotnického prostředku si umyjte ruce.

**INTERAKCIE S INÝMI PRODUKTMI**

Interakcie s inými produktmi nie sú známe, preto je pred použitím vaginálnych čapíkov GINEXID súčasne s inými zdravotníckymi pomôckami alebo liekmi na vaginálne použitie vhodné kontaktovať lekára.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

Vyberte čapík ťahom za dve vopred nastrihnuté křídélka blistra a zaveďte ho hluboko do pošvy.

Pred a po použití tejto zdravotníckej pomôcky si dôkladne umyte ruky.

**DOBA APLIKACE A DÉLKA APLIKACE**

Používejte jeden čípek večer nebo podle lékařského předpisu. Doba používání závisí na vývoji příznaků; v případě potřeby se vaginální čípky GINEXID mohou používat po dlouhou dobu.

**NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Zvláště prodloužené používání všech místně aplikovaných produktů může vést k projevům precitlivlosti. V těchto případech léčbu přerušete a poradte se se svým lékařem za účelem zahájení vhodné léčby. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, které jsou či nejsou popsány v tomto příbalovém letáku, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

**VAROVÁNÍ**

Uchovávejte produkt mimo dosah a dohled dětí. Vyhněte se kontaktu s očima. Nepolykejte.

**DOBA POUŽITELNOSTI, SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE**

Datum použitelnosti je uvedeno na obalu a vztahuje se na produkt v neotevřeném a správně skladovaném obalu. Nepoužívejte po datu vyznačeném na obalu, nebo pokud je balení otevřené nebo poškozené. Skladujte zdravotnický prostředek dobře uzavřený, chráňte před světlem a teplem, nejlépe při teplotě mezi 4°C a 25°C. Zdravotnické prostředky se nesmí likvidovat vyhozením do kanalizace nebo domovního odpadu. Zeptejte se svého lékárníka na způsob likvidace zdravotnických prostředků, které již nepoužíváte. Pomůže to chránit životní prostředí.

**ČAS APLIKÁCIE A DĹŽKA APLIKÁCIE**

Používajte jeden čapík večer alebo podľa lekárskeho predpisu. Doba používania závisí od vývoju príznakov; v prípade potreby sa vaginálne čapíky GINEXID môžu používať dlhodobo.

**NEŽIADUCE ÚČINKY**

Používanie všetkých produktov na lokálne použitie, najmä v prípade dlhodobej aplikácie, môže spôsobiť precitlivosť. Ak k tomu dôjde, prerušite liečbu a obráťte sa na lekára s cieľom začatia vhodnej liečby. Ak sa objavia nežiaduce účinky, ktoré sú alebo nie sú popísané v tomto príbalovom letáku, informujte svojho lekára alebo lekárníka.

**VAROVANIA**

Uchovávejte mimo dosahu a dohledu dětí. Vyhněte se kontaktu s očima. Neprehltajte.

**DOBA POUŽITELNOSTI, SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA**

Doba použitelnosti je uvedená na obale a vzťahuje sa na produkt v neotvorenom a správne uskladnenom obale. Nepoužívajte po dobe vyznačenej na obale, alebo ak je balenie otvorené alebo poškodené. Skladujte zdravotnícku pomôcku dobre uzavretú, chránenu pred svetlom a teplom, najlepšie pri teplote medzi 4°C a 25°C. Zdravotnícke pomôcky sa nesmú likvidovať vyhozením do kanalizácie alebo domového odpadu. Spýtajte sa svojho lekárníka na spôsob likvidácie zdravotníckych pomôcok, ktoré už nepoužívate. Pomôže to chrániť životné prostredie.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK 

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA 



Výrobce/Výrobca: FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITÁLIE/TALIANSKO (ITALY)

Distributor/Distribútor: AXONIA, a.s.

Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Klánovice – ČESKÁ REPUBLIKA